

# HLASITÝ SYSTÉM



Představujeme Vám hlasitý systém, který vychází koncepčně ze signalizačního, oproti němu má výhodu hlasitého hovoru s pacientem.


Výhoda tohoto provedení spočívá v hlasitosti hovoru bez ohledu na skutečnost, kde se pacient na pokoji nachází. Zařízení citlivě snímá plochu celého pokoje a pacient pouze odpovídá na dotazy personálu aniž by něco ovládal. Zahájení, průběh i konec jednosměrného hovoru ovládá personál.

## Výhody hlasitého systému:

- 📍 Lze instalovat bez stavebních úprav na původní vedení AZD
- 📍 Nízká výsledná cena - minimální poruchovost
- 🕒 Záruka 60 měsíců
- 🕒 Noční provoz i v pokojích klientů
- 🕒 Hlasité hlášení na celý pokoj
- 🕒 Pacient ovládá pouze přivolávací tlačítko



## Schéma oddělení hlasitého systému:

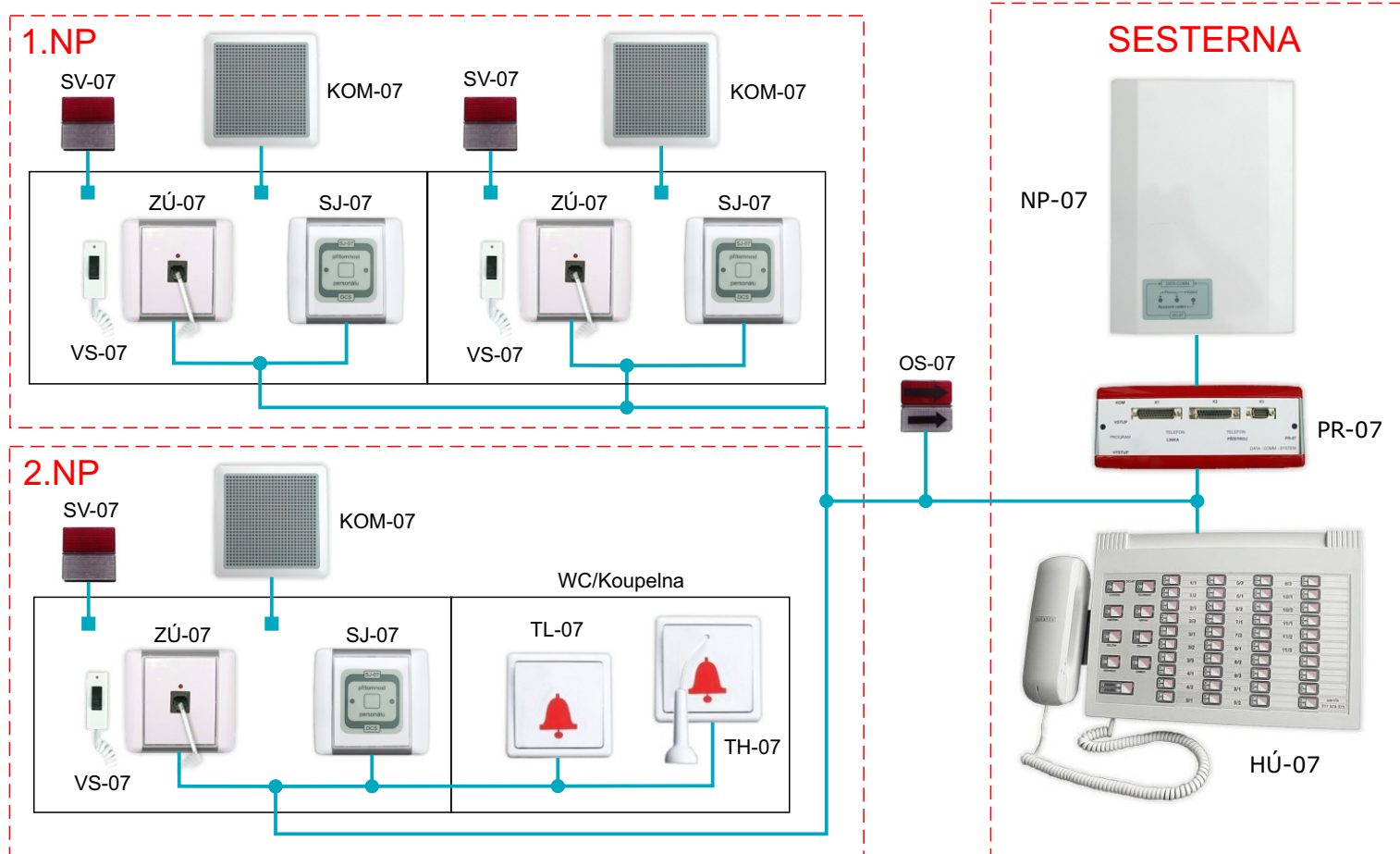

# HLASITÝ SYSTÉM

## HU-07 Hlavní ústředna

- Hlavní ústředna umožňuje tyto funkce:
  - systém ochrany personálu
  - hovorové spojení
  - oběžníkové hlášení
  - spojení telefonního hovoru k lůžku
  - ovládání elektrického zámku
  - noční provoz i v pokojích pacientů
  - odpojení zábavného programu při hovoru



## NP-07 Napaječ

- Je umístěn v místnosti ústředny a zajišťuje potřebná napájecí napětí pro celý systém. Jeho konstrukce zajišťuje bezpečnost provozu v souladu s platnými předpisy.
  - pojistka elektrického zámku
  - předřadná pojistka napájení systému



## SJ-07 Služební jednotka

- Je pokojová skříňka, sloužící pro ošetřující personál. Personál si v době, kdy je na pokoji zapne přítomnost stiskem tlačítka přítomnosti a veškeré volání na oddělení se nyní přesměruje na pokoj.
  - při volání vytváří akustický a optický signál
  - je možné přidat do dvourámečku spolu s oběžníkem



## PR-07 Panel rozvodu

- Zpravidla se umísťuje nad pracovní stůl
  - umožňuje připojení hlavní ústředny, vstupu zábavného programu, telefonní linky, telefonního přístroje a odposlechu zábavného programu



## ZU-07 Zásuvka účastníka

- Bývá umístěna na pokojích u lůžek pacientů umožňuje připojení:
  - pacientského sluchátka
  - volacího tlačítka
  - volání je vyznačeno červenou LED diodou



# HLASITÝ SYSTÉM

**AL-07**
**Alarmová jednotka**

- Bezobslužná jednotka, slouží pro signalizaci volání
- alarm je indikován červenou LED diodou
- možno rozšířit o akustickou signalizaci


**KOM-07**
**Komunikační jednotka**

- Slouží pro jednosměrnou komunikaci pacienta s ošetřujícím personálem
- hlasité hlášení na celý pokoj
- navázání hovoru, hovor, zrušení hovoru ovládá personál
- snímá celý pokoj


**TL-07**
**Tlačítko nouzového volání**

- Je umístěno v místnosti WC, kde je požadováno rychlé a jednoduché spuštění nouzového volání
- stiskem tlačítka se vyvolá nouzové volání, které je signalizováno červenou LED diodou na SJ


**TH-07**
**Táhlo nouzového volání**

- Je umístěno v místnosti koupelny, kde není vhodné použití TL. Použití u sprchových koutů a van.
- funkce jako TL


**VS-07**
**Volací tlačítko**

- Slouží k přivolání ošetřujícího personálu
- může se použít jako levnější náhrada pacientského sluchátka


**SV-07**
**Signalizační svítidlo**

- Slouží pro identifikaci místa vzniku volání, bývá umístěno nad dveřmi pokoje. Svítidlo signalizuje 2 stavy:
  - přítomnost personálu - svítí nepřerušované bílé světlo
  - volání pacienta - svítí nepřerušované červené světlo



SV-07



OS-07

OS-07 - orientační směrové svítidlo, obsahuje směrové šipky, které vyznačují místo vzniku volání