



## Dorozumivací systém DC-07

## Hlavní ústředna HÚ-07:

Je zařízení sestávající se z obslužného pultu a mikrotefonu. Pult je určen k signalizaci různých hlášení a ovládání celého systému. Mikrotefon slouží k hovorovému spojení.



## Napaječ NP-07:

Je umístěn v místnosti ústředny a zajišťuje potřebná napájecí napětí pro celý systém. Jeho konstrukce zajišťuje bezpečnost provozu v souladu s platnými předpisy.



## Panel rozvodu PR-07:

Je umístěn nad pracovním stolem personálu a umožňuje:

>> Připojení hlavní ústředny pomocí sady kabelů ústředny - KR-07 do označených konektorů

>> Rovněž se zde připojuje přívod telefonní linky a telefonní přístroj. V přípojných zásuvkách RJ-11,12 označených (LINKA) (2) a (PŘÍSTROJ) (3)




## Alarmová jednotka AL-07:

Bezobslužný prvek zařízení je konstruován pro přenos alarmového signálu Alarm je signalizován rozsvícením červené LED diody a akustickým nepřerušovaným tónem.



## Lůžková hovorová jednotka (sluchátko) SL-07:

Slouží pro komunikaci účastníka s personálem na hlavní ústředně, poslechu zábavného programu včetně regulace hlasitosti a příjmu telefonního hovoru.

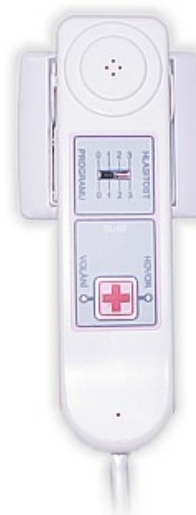

### Služební jednotka SJ-07:

Slouží k rušení volání. Stiskem nízkého zdvihového tlačítka zrušíme veškeré volání z příslušného pokoje. Vyznačení přítomnosti personálu po stisku tlačítka přítomnosti a rozsvícení zelené kontrolky se přepíná signalizace veškerého volání do místnosti s vyznačenou přítomností personálu. Volání je signalizováno červenou LED diodou.



### Volací tlačítko VS-07:

Nahrazuje funkci tlačítka volání na lůžkové hovorové jednotce s tím rozdílem, že není možné hovorové spojení.



### Tlačítko nouzového volání TL-07:

Instaluje se do místnosti koupelen a WC a tam kde je potřeba jednoduchým způsobem přivolat ošetřující personál. Stiskem tlačítka se spustí nouzové volání signalizující červená LED dioda na kontrolní skřínce.



### Zásuvka účastníka ZÚ-07:

Je umístěna na lůžkových pokojích a umožňuje přes připojovací konektor připojit:

- >> Volací šňůra s tlačítkem VS-07
- >> Lůžková hovorová jednotka (sluchátko) SL-07

Při volání svítí nepřerušovaně na ZÚ červená LED dioda.



### Služební jednotka hovorová SJH-07:

Slouží k hlasitému spojení služební místnosti s ústřednou. Obsahuje dvě kontrolní LED pro spojení a volání.



### Signalizační svítidlo SV-07:


Slouží k identifikaci funkcí z pokojových kontrolních skříněk. Bývá umístěno nad dveřmi příslušného pokoje. Světlo signalizuje následné stavy:

- >> Přítomnost personálu - svítí nepřerušované bílé světlo
- >> Volání účastníka - svítí červené nepřerušované světlo



### Orientační směrové svítidlo OS-07:

Je stejného provedení a má stejné funkce jako SV-07 pouze obsahuje směrové šipky, které mají směřovat personál k místu vzniku volání.

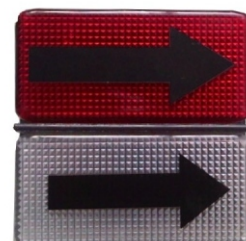

### Oběžník OB-07:

Zajišťuje přenos oběžníkového hlášení. Může být přidán jako rozšiřující prvek do společného rámečku k ostatním prvkům.



### Komunikační jednotka KOM-07:

Používá se stejně jako modul mikrofону při hlasitém provedení a s MM-07 tvoří funkční celek.



### Videotelefon VI-07:

Umisťuje se ke vchodu na lůžkové oddělení.



### Táhlo nouzového volání TH-07:

Instaluje se do místnosti koupelen a WC a tam kde je potřeba jednoduchým způsobem přivolat ošetřující personál. Zatáhnutím za táhlo se spustí nouzové volání signalizující červená LED dioda na kontrolní skřínce.

